



韓國口碑品牌!!
冷凍減脂



多部位雕塑治療 依照部位及脂肪厚度不同,選擇適當探頭進行全身性雕塑

窄版

臀部

一般

側腰、背部

寬版

腹部、大腿

平面

大腿



非侵入式 · 低溫減脂 · 恢復期短

冷凍減脂

泰可國際
TKMED

地址: 台北市信義區基隆路一段70號3樓

本產品資訊僅提供醫師及護理人員內部教育訓練使用

酷S
MICROL S

冷 凍 減 脂



韓國口碑品牌!!



凍感曲線

減 · 少 · 腰 · 腹 · 尺 · 寸

非侵入式 · 低溫減脂 · 恢復期短

NEW

進化體雕技術

冷凍減脂-作用原理

以一種非侵入式冷卻降溫設備, 利用精準零下冷凍能量促使細胞自然凋亡, 適用於輔助減少腰、腹部的皮下脂肪層厚度

1 非侵入式的減脂療程

脂肪細胞會透過冷凍療程被破壞及自然代謝

2 非手術減脂療程

不需動刀, 不需麻醉, 治療後即可恢復正常生活


3 高效率的減脂療程

療程後約1個月能看到改善, 約3個月能達到最佳效果


雕塑身型的理想選擇

脂肪細胞凋亡


運用低溫凍結技術, 誘發脂肪細胞自然凋亡, 將治療後凋亡的脂肪細胞隨著新陳代謝排出體外, 達到「脂肪細胞數目減少」的目標。

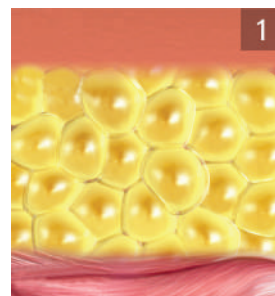


1 冷凍減脂療程透過低溫破壞細胞, 使脂肪細胞結晶化後凋亡

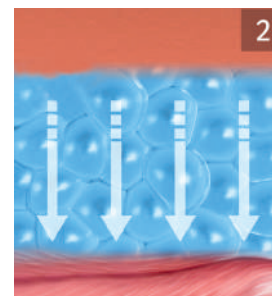

2 只針對脂肪細胞作用, 不傷害皮膚與周圍細胞組織

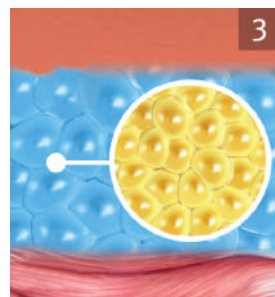


3 脂肪細胞進入凋亡階段, 並裂解成較小顆粒

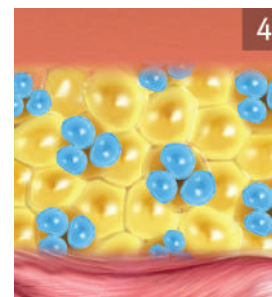

4 結晶化的脂肪細胞由身體自然代謝, 治療區域的脂肪數量減少

精準鎖定脂肪破壞

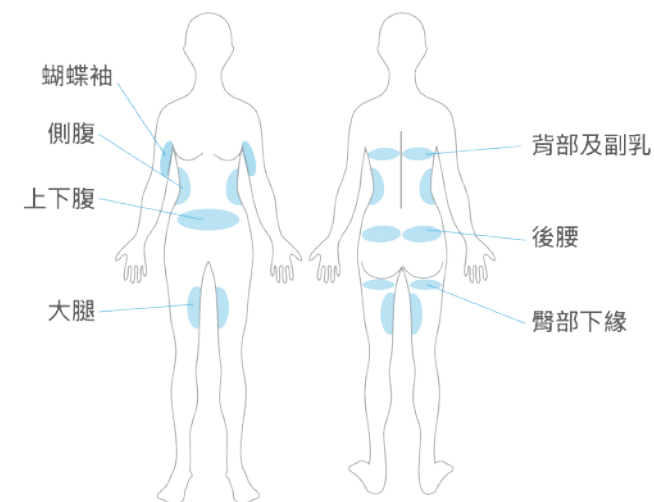

Q&A

- 1 誰適合做此療程?**
此療程針對局部皮下脂肪過多患者, 尤其以腹部/腰部/大腿內側為治療部位, 有效減少脂肪厚度。
- 2 一般而言, 需要幾次療程?**
建議3次為一完整療程, 主要還是依脂肪厚度及部位打造專屬治療計畫。
- 3 療程需要多久時間?**
40~60分鐘(依患者治療部位皮脂厚度而有所不同)
- 4 是安全無虞的嗎?**
非侵入是療程, 無手術風險, 術後即可正常生活作息。
- 5 療程的疼痛感?**
可接受的不適感, 類似拔罐的感受。
- 6 術後何時可以看到成效?**
治療效果視部位的不同而有所差異, 治療後約一個月能改善, 3個月後的效果最為明顯。